




Zelfklevend zacht siliconen littekenverband

- zelfklevend, zonder extra fixatie
- discreet en dun
- comfortabel in het dagelijkse leven
- slechts 1 verband per week




Safetac® is een unieke, gepatenteerde, zachte siliconentechnologie. Safetac® verbanden betekenen een grote vooruitgang binnen de wondzorg: zij minimaliseren trauma aan de wondbodem en aan de omgevende huid, zij minimaliseren pijn voor de patiënt en voorkomen verweking van de wondomgeving door deze volledig af te sluiten. Safetac® verbanden verkleven niet in de wond.


Gebruiksaanwijzing

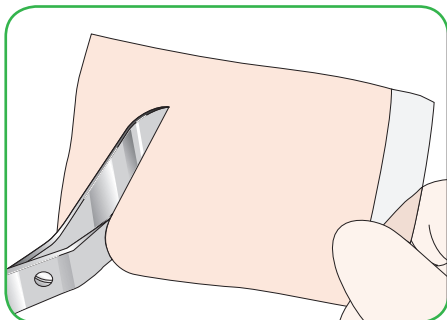

Verwijder het schutblad. Indien nodig, knip in de juiste vorm. Verknip alvorens het schutblad te verwijderen.

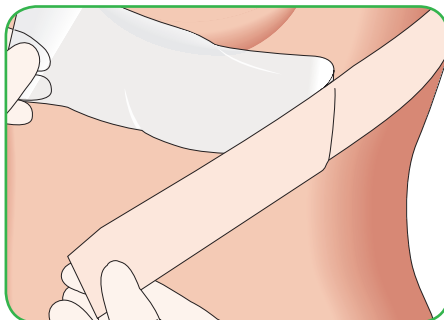

De huid goed drogen voor het aanbrengen van Mepiform®.

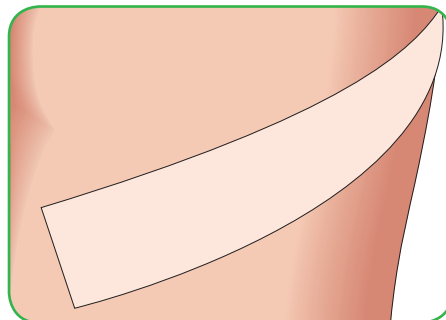

Eenmaal per dag verwijderen om de huid te wassen. Na het baden of douchen enkele minuten wachten alvorens het terug aan te brengen.

Hoe werkt Mepiform®?

Men heeft empirisch vastgesteld dat de lokale toepassing van siliconen een positieve impact heeft op hypertrofische littekens en keloïden⁽¹⁾. De aanblik van een oud litteken verbeteren kan 3 maanden tot een jaar duren, afhankelijk van de toestand van het litteken. Mepiform® moet 24/24 uur gedragen worden. Het is aanbevolen Mepiform® eenmaal daags te verwijderen, bijvoorbeeld voor het nemen van een douche of een bad, voor inspectie en het reinigen van de huid. In preventie zal Mepiform® 2 tot 6 maanden aangebracht worden, afhankelijk van de toestand van het litteken.

Voordelen van Mepiform®

- Zelfklevend, geen extra fixatie
- Dun, flexibel en discreet
- Kan gedurende dagelijkse activiteiten gedragen worden
- Kan verwijderd en teruggeplaatst worden
- Kostenbesparend: éénzelfde Mepiform® kan gemiddeld gedurende 7 dagen aangebracht worden

Referenties:

1. Quinn KJ (1987), Burns 13:33-40; Ahn ST et al (1991), Arch Surg 126:499-504; Dockery GL et al (1994), J Foot Ankle Surg 33:110-19; Katz BE (1995) Cutis 56:65-7; Carney SA et al (1994) Burns 20:163-7.
2. AS/NZS 4399:1996.

Toepassingen

- Oude of nieuwe hypertrofische littekens en keloïden
- Gesloten wonden in preventie van hypertrofische en keloïde littekens

Voorzorgsmaatregelen

Bij maceratie, rash, jeuk of irritatie dient de behandeling tijdelijk stopgezet te worden. Zodra de symptomen verdwenen zijn, Mepiform® weer toepassen. Gradueel de toepassingsduur per dag opvoeren.

Mepiform® heeft een UV protectie factor equivalent aan 7.7⁽²⁾.



Assortiment Mepiform® (steriel)

| Afmeting | Cnk-code/verp. | Art.nr. | Binnenverp. | Transportverp. |
|------------|----------------|---------|-------------|----------------|
| 5 x 7,5 cm | 1457-274 | 293200 | 5 x 1 stuk | 30 stuks |
| 10 x 18 cm | 1457-282 | 293400 | 5 x 1 stuk | 25 stuks |
| 4 x 30 cm | 1457-266 | 293100 | 5 x 1 stuk | 25 stuks |