

# Mepilex<sup>®</sup> Border Lite

## DUN, ZELFKLEVEND ABSORBEREND SCHUIMVERBAND

- Minimaliseert pijn en weefseltrauma
- Voor droge tot vochtige wonden
- Geen extra fixatie nodig

### Polyurethaan film op de rugzijde

- Lucht- en waterdampdoorlaatbaar
- Waterdicht
- Virus- en bacteriebestendig (>25nM)

### Safetac<sup>®</sup> laag

- Atraumatisch bij verbandwissels
- Kleeft niet in de wond
- Minder risico op maceratie

**Safetac<sup>®</sup>**  
TECHNOLOGY


### 2-laags wondkussen

- Polyurethaan schuim: snelle absorptie van exsudaat
- Distributielaag: optimale absorptiecapaciteit en minder kans op lekkage


### Safetac<sup>®</sup> technologie

Safetac is een unieke en gepatenteerde adhesietechnologie die pijn voor de patiënt en trauma aan de wond minimaliseert. Safetac is uitsluitend beschikbaar bij wondverbanden van Mölnlycke Health care, waaronder Mepilex wondverbanden, Mepitel, Mepiform en Mepitac.

Surf voor meer informatie naar [www.safetac.com](http://www.safetac.com)

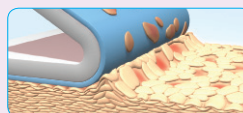


Traditionele kleeflagen hechten zich alleen aan de tophuidcellen. Daardoor kleeft het verband plaatselijk harder om ter plaatse te kunnen blijven.

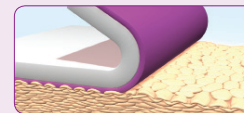


Safetac vormt zich naar de huidporiën en sluit daarbij de wondranden goed af. Het kleeft bovendien niet in een vochtig wondbed.

## Gebruiksaanwijzing

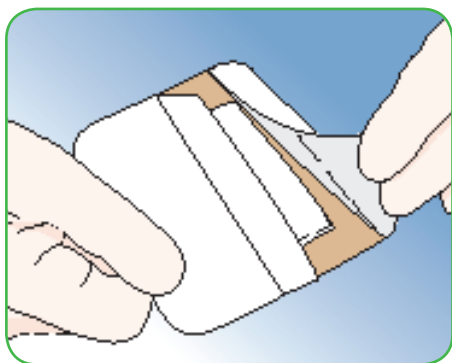

Reinig het wondgebied.  
Verwijder het schutblad.

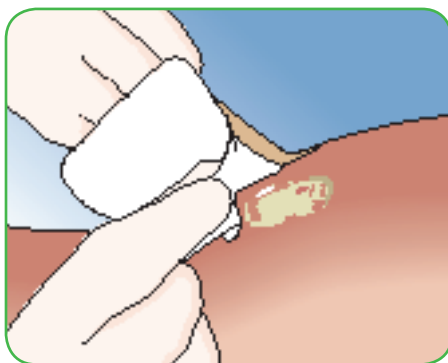

Breng de klevende zijde op de wond aan. Het verband niet uittrekken.

## Voordelen


- Minimaliseert pijn en trauma bij verbandwissels
- Minimaliseert risico op maceratie
- Geen extra fixatie nodig: eenvoudige applicatie
- Huidvriendelijke fixatie
- Dun en comfortabel
- Vormt zich perfect naar de lichaamscontouren
- Kan meerdere dagen op de wond blijven, afhankelijk van de wondconditie
- Douchebestendig

## Indicaties

- Droge tot vochtige wonden (bv. been- en voetulcera)
- Traumatische wonden (bv. schaafwonden, snijwonden)
- Topletsels
- Bescherming op beschadigde en/of gevoelige huid bij zuigelingen, kinderen en bejaarden
- Doorligwonden (decubitus)

## Voorzorgsmaatregelen

Bij klinische tekenen van infectie een adequate behandeling instellen

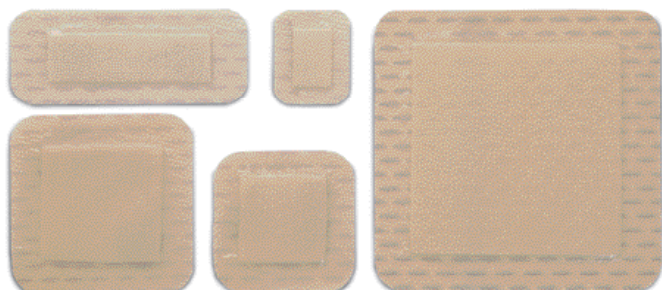

### Mepilex Border Lite assortiment

Art. nr	Afm. (cm)	CNK-code	Stuks/RET	Stuks/TRP
281000	4 x 5	2256-592	10	7x10
281100	5 x 12,5	2256-626	5	13x5
281200	7,5 x 7,5	2256-634	5	14x5
281300	10 x 10	2256-667	5	10x5
281500	15 x 15	2256-683	5	10x5

Meer informatie op [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72/2, 2600 Berchem, België. Tel +32 (0)3 286 89 50 - Fax +32 (0)3 286 89 52

Mölnlycke Health Care, Mepilex® zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken en logo's van Mölnlycke Health Care.

© 2013 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden.