



Het gebruik van de Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno is eenvoudig en intuïtief.

Er zijn slechts 2 eenvoudige stappen.

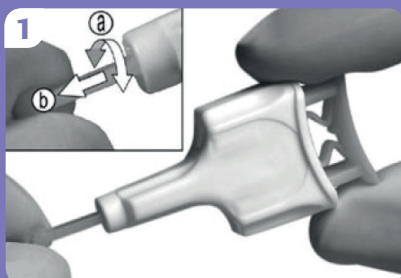

1. Draai het steriele beschermkapje een kwart draai naar voren en terug of andersom (a). Verwijder het kapje (b).

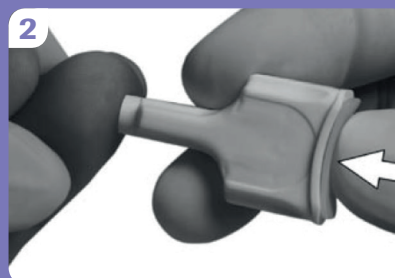

2. Klem de prikker tussen uw wijsvinger, middelvinger en duim. Druk de prikker stevig tegen het te prikken huidoppervlak. Druk de gele prikknop volledig in.

Vorbereiding van de bloedafname

- Wij raden aan om capillair bloed af te nemen aan de zijkant van de vingertop, omdat deze prikplaats het minste pijn veroorzaakt. Niettemin, kan elke vinger gebruikt worden.
- Vraag de patiënt zijn handen te wassen met warm water en zeep, en droog ze goed af. Dit verzekert een propere prikplaats en stimuleert de bloedsomloop.
- Indien ontsmettingsdoekjes worden gebruikt, dient de vinger volledig droog te zijn alvorens verder te gaan.

Een bloeddruppel prikken

- Masseer zachtjes van de vinger naar de vingertop om zo een bloeddruppel te stimuleren.
- Voor sommige diagnostische tests mag de vingertop niet krachtadig worden gemasseerd of samengedrukt, gezien dit kan leiden tot onjuiste resultaten.
- Voor uw eigen veiligheid, gelieve handschoenen te dragen bij elke bloedafname.

Ontdek wat mogelijk is.

Voor meer informatie, gelieve de handleiding te raadplegen of bel de Accu-Chek® Service op het gratis nummer



ACCU-CHEK en SAFE-T-PRO zijn handelsmerken van Roche. © 2013 Roche Diagnostics.

www.accu-chek.be
Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
1800 VILVOORDE

ACCU-CHEK®