

1 clic et c'est tout!



1 clic pour armer et piquer



Fenêtre de comptage des lancettes restantes

10

Levier pour passer à une nouvelle lancette

11 profondeurs de piqûre pour chaque type de peau

3 • 2 • 1

6 lancettes dans une cartouche



Insérer une cartouche.



Enlevez le capuchon de protection.



Insérez une cartouche de lancettes.



Remplacez le capuchon.

Obtenir un échantillon de sang.



Sélectionnez la profondeur de piqure.



Armez et piquez en un seul clic.



Poussez le levier une seule fois d'avant en arrière pour passer à une nouvelle lancette.



Cartouche neuve



Cartouche usagée

Veillez à utiliser les 6 lancettes avant d'enlever la cartouche. Une fois enlevée, la cartouche ne peut plus être réinsérée pour une raison d'hygiène.

Découvrez un monde de possibilités.



www.accu-chek.be



www.facebook.com/accuchekbe



0800 93 626



www.youtube.com/AccuChekBelgium

ACCU-CHEK et FASTCLIX sont des marques déposées de Roche. © 2015 Roche Diagnostics

Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
B-1800 VILVOORDE

ACCU-CHEK®