

Insérer une nouvelle cassette-test

Après avoir effectué les 50 tests




1 Faites glisser le capot de protection jusqu'à la butée.



2 Faites glisser le cran de sécurité vers le haut pour que le couvercle du compartiment de la cassette s'ouvre.



3 Retirez la cassette-test usagée de l'appareil.

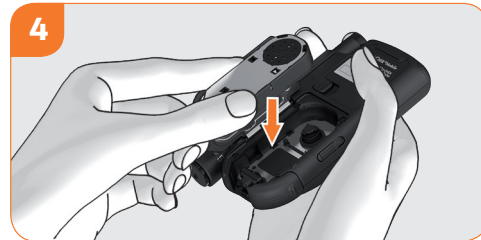

4 Insérez la nouvelle cassette-test dans le lecteur. Refermez le couvercle du compartiment de la cassette et le capot de protection.

Insérer une nouvelle cartouche de lancettes

Après avoir utilisé les six lancettes



1 Retirez l'embout de l'autopiqueur et la cartouche de lancettes usagée.



2 Insérez la nouvelle cartouche de lancettes dans l'autopiqueur en introduisant d'abord la partie blanche puis replacez l'embout.



3 Tournez l'embout jusqu'à ce que la profondeur de piqûre souhaitée se trouve en face de la marque. Essayez tout d'abord une profondeur moyenne de piqûre, la position 3 par exemple.



4 Changez de lancette en faisant glisser le levier jusqu'à la butée (direction ①), puis replacez-le à sa position initiale (direction ②).

Sans bandelette, simple et intelligent.



Quatre étapes simples pour mesurer votre glycémie.




Quatre étapes simples pour mesurer sa glycémie



Ouvrez le capot. L'appareil s'allume.



Piquez-vous le doigt pour obtenir une goutte de sang.

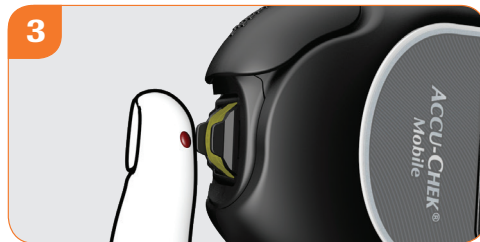

Appliquez doucement la goutte de sang au centre de la zone réactive. **Ne pressez pas la zone réactive contre votre doigt.**




Lisez le résultat et refermez le capot. L'appareil s'éteint.


Quatre points importants pour une mesure fiable




Commencez par vous **laver les mains** avec de l'eau tiède et au savon. Rincez bien et séchez-vous soigneusement les mains à l'aide d'une serviette propre.

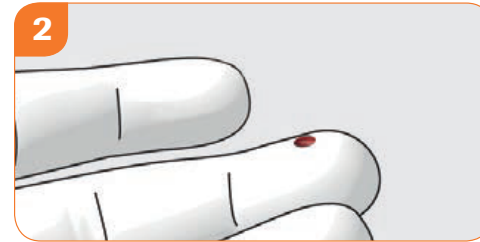

Veillez à obtenir une **goutte de sang bien formée**. La goutte ne doit pas s'étaler.

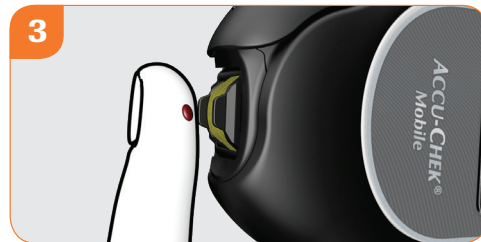

Tenez votre lecteur de manière à pouvoir voir la zone de test lors de l'application de la goutte de sang. Placez votre doigt contre les butées afin que la goutte de sang soit en contact avec le milieu de la zone de test. Gardez votre doigt aussi immobile que possible.

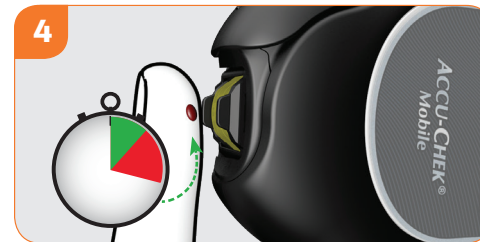

Appliquez la goutte de sang immédiatement après l'avoir obtenue. Retirez votre doigt dès que l'écran affiche « Mesure en cours » et qu'un bip retentit (si activé).

Une équipe de spécialistes est là pour vous aider!



Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information sur les produits et services d'Accu-Chek®.

- Utilisation
- Informations générales
- Réponses à vos questions

Vous pouvez nous joindre gratuitement au 0800 93 626, du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00. Simple et rapide! Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Surfez sur www.accu-chek.be

Achetez facilement vos produits en ligne www.mydiabetescare.be

Appelez l'Accu-Chek® Service **0800 93 626**

Suivez nous sur Facebook www.facebook.com/accuchekebe

Regardez les vidéos sur www.youtube.com/AccuChekBelgium

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE, CLIXMOTION et FASTCLIX sont des marques de Roche.
© 2018 Roche Diagnostics



Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
1800 VILVOORDE

ACCU-CHEK®

Pour garantir une mesure et des décisions thérapeutiques fiables, il convient d'utiliser correctement l'appareil. Veuillez donc suivre attentivement ces instructions.