


Mepitel® One

EEN EFFICIËNTE WONDCONTACTLAAG


- Minimaliseert pijn en trauma tijdens verbandwissel^{1,2}
- Kan tot 7 dagen³⁻⁷ ter plaatse blijven, wat een ongestoorde wondgenezing toe laat en is meteen ook een kostenefficiënte^{1,8} behandeling

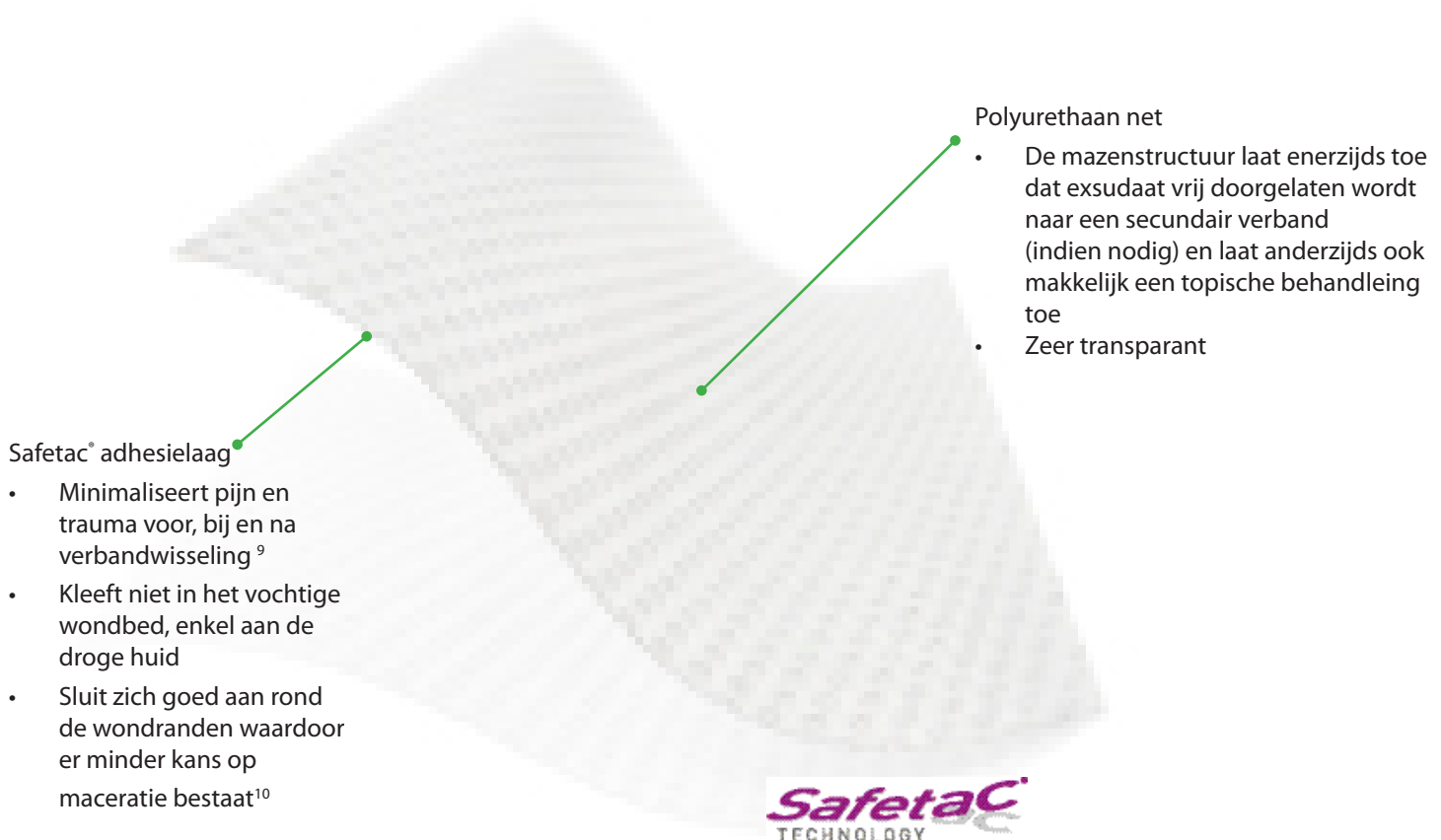


Safetac® technologie

Safetac® technologie. Minder pijn en weefseltrauma.

Safetac is een gepatenteerde adhesietechnologie die pijn voor de patiënten en trauma aan de wonden minimaliseert. Safetac technologie is exclusief onderdeel van de Mölnlycke Health Care verbanden, inclusief Mepilex® wondverbanden, Mepitel®, Mepiform® en Mepitac®.

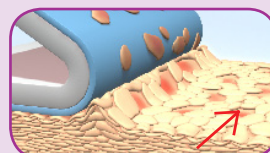


Traditionele kleeflaag trekt huidcellen mee

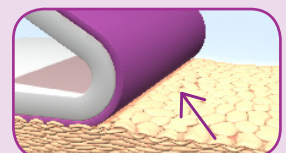


Safetac adhesielaag trekt geen huidcellen mee


Gebruiksaanwijzing Mepitel® One

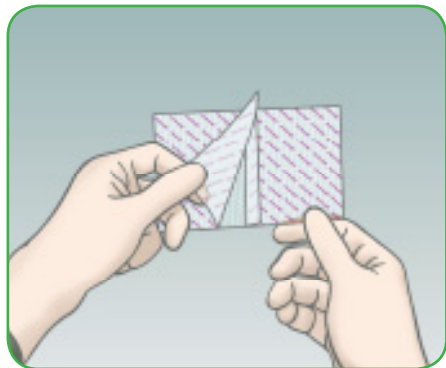

Reinig de wond. Verwijder het schutblad

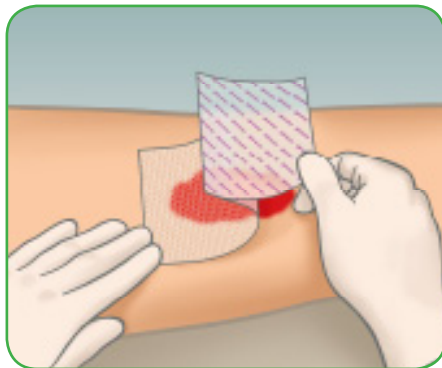

Breng Mepitel® One op de wond aan

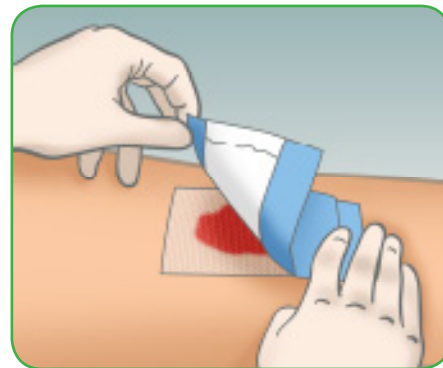

Breng indien nodig bovenop Mepitel® One een secundair absorberend verband aan
bv. Mesorb.

Hoe werk Mepitel One

Mepitel One kan tot 7 dagen³⁻⁷ ter plaatse blijven, afhankelijk van de wondconditie, waardoor de wondgenezing ongestoord kan verlopen en nieuw weefsel niet belast wordt. De poreuze structuur van Mepitel One laat wondvocht gemakkelijk door in een secundair absorberend verband. De Safetac adhesielaag voorkomt verkleving in de wond en zorgt voor atraumatische verbandwisselingen. De Safetac adhesielaag sluit zich goed rond de wondranden aan zodat exsudaat niet kan worden verspreid naar de omgevende huid waardoor minder kans op maceratie bestaat.

Voordelen van Mepitel One

- Minimaliseert pijn en trauma bij verbandwisselingen
- Kan tot 7 dagen ter plaatse blijven waardoor een ongestoorde wondgenezing mogelijk is
- Maak minder verbandwisselingen nodig
- Minimaliseert het risico op maceratie
- Behoudt zijn kwaliteit langer dan andere verbanden - laat geen residus na en droogt niet uit
- Transparant voor een eenvoudige wondinspectie tijdens het gebruik en tijdens het dragen
- Vormt zich zeer goed naar lichaamscontouren, wat het patiëntcomfort ten goede komt.
- Blijft goed ter plaatse zitten
- Minder risico op huidirritaties en allergieën

Toepassingen

Mepitel One is geschikt voor onder andere pijnlijke wonden, skin tears, schaafwonden, handchirurgie, tweedegraadsbrandwonden, traumatische wonden, blaarvorming, huidtenten, bestraalde huid, been -en voetulcera. Het kan ook gebruikt worden als bescherm laag op niet-vochtafgevend wonden en op een fragiele huid.

Waarschuwing

Indien Mepitel One wordt toegepast bij brandwonden afgedekt met huidtransplantaten of bij huiddefecten na laserbehandeling, kunnen er bij foutief gebruik afdrucken van het product op de huid ontstaan.

Voorzorgsmaatregelen

- De wond moet regelmatig gecontroleerd worden op infecties. Bij klinische tekenen van infectie dient men een adequate behandeling in te stellen.
- Niet gebruiken bij Epidermolysis Bullosa patiënten omwille van de sterkere huidadhesie.
- Mepitel One gebruikt bij brandwonden behandeld met huidtransplantaten: vermijd onnodige druk op het verband.
- Mepitel One used na gezichts' resurfacing': vermijd druk uit te oefenen bij het oplichten van het verband en herpositioneer het verband minstens om de 2 dagen.
- Bij bloedende wonden of wonden met visceus exsudaat, Mepitel One afdekken met een vochtig absorberend verband.
- Bij fixatie van huidtransplantaten, het verband minimaal 5 dagen ter plaatse laten.



MEPITEL ONE ASSORTIMENT (steriel verpakt)

Afmeting (cm)	Artikelnr.	CNK-code	Stuks/doos
5 x 7,5	289100	2678-399	10
7,5 x 10	289300	2678-415	10
10 x 18	289500	2678-449	10
17 x 25	289700	2678-464	5