



Démarrer avec le lecteur OneTouch Verio Reflect®

Le lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® est équipé d'un Coach de Glycémie* qui vous donne une guidance personnalisée, de la compréhension et de la motivation. L'Indicateur Dynamic d'Objectif ColourSure® indique quand votre résultat s'approche d'une valeur haute ou basse.**



Insérez une bandelette réactive OneTouch Verio®

Appliquer une goutte de sang sur un des deux côtés de la bandelette réactive

Le lecteur indique si la glycémie est dans l'objectif (vert), inférieur au seuil Hypo (bleu) ou supérieure au seuil Hyper (rouge) définis dans le lecteur. Vous verrez également quand votre résultat s'approche d'une valeur haute ou basse**.



Avant toute utilisation du lecteur OneTouch Verio Reflect® et de l'autopiqueur OneTouch® Delica® Plus, lisez attentivement le manuel d'utilisation et la notice qui sont livrés parmi les composants du système.

* Blood Sugar Mentor™

** Ne prenez pas de décisions basées sur l'Indicateur d'Objectif. Les décisions relatives au traitement doivent être basées sur le résultat et les recommandations du professionnel de santé. Les limites inférieures et supérieures des objectifs de glycémie que vous programmez dans le lecteur OneTouch Verio Reflect® s'appliquent à tous les résultats des tests de glycémie. Ceci comprend les tests pris avant et après les repas, la prise de médicaments et toutes activités pouvant affecter votre taux de glycémie. Nous recommandons aux patients de s'entretenir avec leur professionnel de santé au sujet des limites inférieures et supérieures qui leur conviennent.




Le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus

Le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus vous sera livré avec votre lecteur OneTouch Verio Reflect®. Les lancettes sont stériles et à usage unique. Avant toute utilisation du lecteur OneTouch Verio Reflect® et de l'autopiqueur OneTouch® Delica® Plus, lisez attentivement le manuel d'utilisation et la notice qui sont livrés parmi les composants du système. Ci-dessous vous voyez un aperçu des étapes pour prélever un échantillon sanguin au bout de votre doigt.

Conseils pour aider à rendre les tests de glycémie moins douloureux et à réduire le risque d'infection

- **Avant de tester, lavez les mains et le site de prélèvement avec de l'eau chaude et du savon. Rincez et séchez complètement.** Des contaminants sur la peau peuvent influencer les résultats.
- **Utilisez une lancette stérile neuve à chaque prélèvement.** Ne pas réutiliser.
- **Pincez et/ou massez délicatement le bout du doigt jusqu'à ce qu'une goutte de sang ronde se forme.**
- **Appuyez le stylo autopiqueur contre le côté de la partie supérieure du doigt.**
- **Choisissez un site de prélèvement différent à chaque test.** Des piqûres répétées au même endroit peuvent causer des douleurs et des callosités.
- **Ne partagez jamais une lancette ou un stylo autopiqueur avec quelqu'un.** Utilisation pour un seul patient.

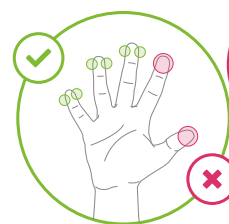

Utilisez
uniquement le
bout des doigts

Préparer votre stylo autopiqueur

- **1** Enlevez le capuchon du stylo autopiqueur
- **2** Insérez la lancette stérile dans le stylo autopiqueur et enlevez la protection
- **3** Remplacez le capuchon sur le stylo autopiqueur
- **4** Ajustez le réglage de profondeur
Les chiffres plus bas sont pour les piqûres moins profondes et les chiffres plus hauts pour les piqûres plus profondes.
- **5** Armez le stylo autopiqueur en glissant le bouton vers l'arrière jusqu'au cliqué
Vous pouvez prélever maintenant

Prélever et disposer de la lancette usagée

- **1** Piquez votre doigt
Tenez le stylo fermement contre le côté de votre doigt. Appuyez sur le bouton de déclenchement pour piquer.
- **2** Appliquez l'échantillon
Appliquez l'échantillon de sang selon les instructions du manuel d'utilisation de votre OneTouch® pour une application correcte de l'échantillon.
- **3** Enlevez à nouveau le capuchon du stylo autopiqueur
- **4** Couvrez la pointe exposée de la lancette
Placez la protection de la lancette sur une surface dure et poussez la pointe de la lancette dans le côté plat du disque.
- **5** Ejectez la lancette
En tenant le stylo autopiqueur vers le bas, faites glisser le bouton vers l'avant jusqu'à ce que la lancette sorte. Remplacez le capuchon sur le stylo.
- **6** Remplacez le capuchon du stylo autopiqueur
Jetez prudemment la lancette usagée après chaque utilisation afin d'éviter des accidents de piqûre involontaires.

Appelez le Service à la Clientèle OneTouch® pour de la formation individuelle et du soutien avec l'usage de votre lecteur OneTouch®.



Visitez www.OneTouch.be



Appelez gratuitement au 0800 14660

ONETOUCH®
every touch is a step forward™