






Suivez les étapes détaillées de ce guide pour la première prise en main de votre lecteur de glycémie.

**IMPORTANT :** Veuillez lire le manuel d'utilisation fourni avec le système.

## Icônes du lecteur de glycémie

-  Fonction **Bluetooth®** activée
-  Synchronisation
-  Résultat du test avec la solution de contrôle
-  Pile faible
-  Points d'avancement de la navigation d'écran

Consultez le manuel d'utilisation pour les symboles et les icônes du lecteur de glycémie et leur signification.

Contactez le Service à la Clientèle OneTouch® au numéro gratuit 0800 14660 (BE) ou 800 25749 (LU), ou visitez notre site Web [www.OneTouch.be](http://www.OneTouch.be) ou [www.OneTouch.lu](http://www.OneTouch.lu).

Fabriqué par :  
LifeScan Europe GmbH  
Gubelstrasse 34  
6300 Zug  
Switzerland

OneTouch®  
AW 07218401A  
© 2018–2019 LifeScan, Inc.  
Date rév. : 01/2019


 **CE**  
0344






Fold


## 1 Réglage du lecteur de glycémie

### Allumez le lecteur

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran Bienvenue apparaisse.

Utilisez les boutons  ou  pour le réglage des différents paramètres et appuyez sur  pour confirmer.

### Réglage de la langue

Sélectionnez la langue souhaitée, puis appuyez sur .


### Facultatif : Terminez le réglage au moyen de l'application mobile OneTouch Reveal®\*.

Sélectionnez **Oui** pour que l'application vous guide dans le réglage.




### Téléchargez l'application mobile OneTouch Reveal® avant d'associer votre lecteur de glycémie et votre appareil mobile.



### Réglage de l'heure


Appuyez sur le bouton  si l'heure est correcte ou modifiez-la au besoin et confirmez.

\* Visitez le site [www.OneTouch.be](http://www.OneTouch.be) ou [www.OneTouch.lu](http://www.OneTouch.lu) pour plus d'informations sur l'application mobile OneTouch Reveal® et pour découvrir si elle est disponible dans votre pays.

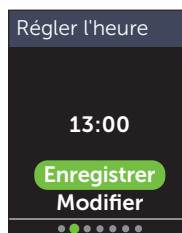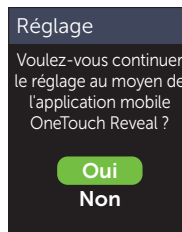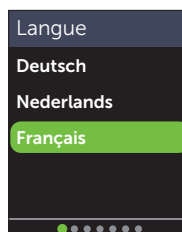


Fold


### Réglage de la date

Appuyez sur le bouton  si la date est correcte ou modifiez-la au besoin et confirmez.


### Réglage des seuils d'objectif à l'heure des repas

Appuyez sur le bouton  si les seuils pré-réglés de vos objectifs Avant repas et Après repas sont corrects ou modifiez-les au besoin et confirmez.




### Réglage du suivi des tests

Appuyez sur le bouton  si l'objectif prédéfini est correct ou modifiez-le au besoin et confirmez.

### Réglage de l'objectif moyen sur 90 jours

Appuyez sur le bouton  si l'objectif moyen sur 90 jours est correct ou modifiez-le au besoin et confirmez.

**REMARQUE :** Discutez avec votre professionnel de santé des seuils d'objectif, de l'objectif de suivi des tests et de l'objectif moyen sur 90 jours qui sont appropriés pour vous.

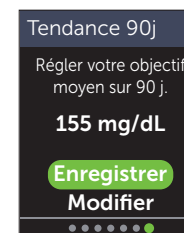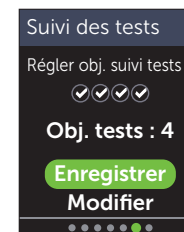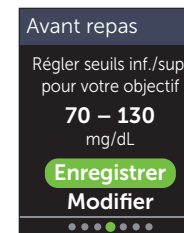


Fold


## 2 Réalisation d'un test

Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon, rincez-les et séchez-les avant de prélever un échantillon. Retirez l'embout du stylo autopiqueur, puis insérez une lancette stérile. Tournez le disque de protection. Remettez l'embout du stylo autopiqueur en place.


Insérez une bandelette réactive (face dorée avec les deux ergots argentés face à vous) pour allumer le lecteur.

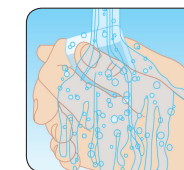

Ergots argentés

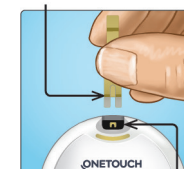

Fente d'insertion de la bandelette réactive

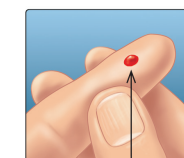


Taille approximative

Ajustez le réglage de la profondeur du stylo autopiqueur. Armez le stylo autopiqueur et maintenez-le fermement contre le côté de votre doigt. Appuyez sur le bouton déclencheur. Massez doucement votre doigt afin d'obtenir une goutte de sang bien ronde.

Appliquez l'échantillon sanguin sur l'un des deux côtés latéraux de la bandelette réactive.

Une fois que le sillou est rempli, il devient rouge et votre résultat s'affiche après 5 secondes environ.

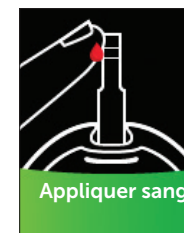

Appliquer sang

Fold

Fold

Fold


### 3

#### Lecture du résultat

##### Indicateur d'objectif dynamique ColourSure®

L'indicateur d'objectif dynamique ColourSure® vous indique immédiatement si le résultat est inférieur à l'objectif (bleu), supérieur à l'objectif (rouge) ou dans l'objectif (vert). Il indique également quand votre résultat se rapproche de l'extrémité inférieure ou supérieure de votre objectif glycémique. Une note textuelle ou un emoji pointe sur un segment de la barre de couleur.

##### Exemples de résultat

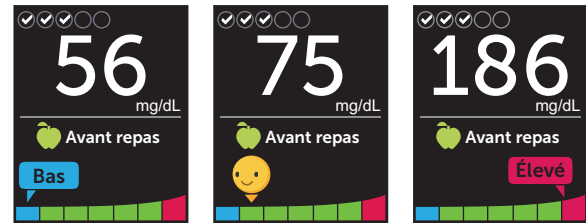

Inférieur à l'objectif

Extrémité inférieure de l'objectif

Supérieur à l'objectif

##### Informations liées aux repas et autres informations


Une information Avant repas (🍏) est automatiquement appliquée à votre résultat. Vous pouvez remplacer l'information liée aux repas par Après repas (🍷) et ajouter une autre information.



#### Messages de la fonction Coach de Glycémie (Blood Sugar Mentor™)

La fonction Coach de Glycémie (Blood Sugar Mentor™) fournit un aperçu sur vos progrès et offre des conseils sur la gestion du diabète, y compris des messages éducationnels et motivationnels basés sur vos résultats glycémiques actuels et précédents, ainsi que d'autres données suivies.

##### Exemples de messages de la fonction Coach de Glycémie (Blood Sugar Mentor™)

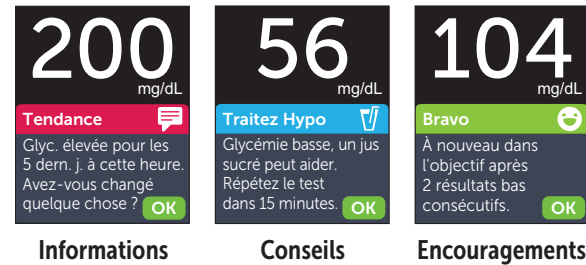

Informations

Conseils

Encouragements

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par LifeScan Scotland Ltd. Les autres marques de commerce et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

### 4

#### Connexion à un appareil mobile


La technologie Bluetooth® vous permet d'envoyer sans fil vos résultats à un appareil mobile sur lequel vous pouvez utiliser l'application mobile OneTouch Reveal® pour consulter et analyser vos résultats à travers différentes représentations graphiques, régler des objectifs de suivi des tests, consulter les messages de la fonction Coach de Glycémie (Blood Sugar Mentor™) et identifier des tendances glycémiques.

Dans le menu Réglages, sélectionnez **Bluetooth**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Une ✓ indique si la fonction **Bluetooth®** est actuellement activée ou désactivée.

Appuyez sur le bouton **↑** ou **↓** pour faire passer le statut de **Bluetooth®** à **Activé** et appuyez sur **OK**.

À l'invite de votre appareil mobile, entrez le code PIN affiché.

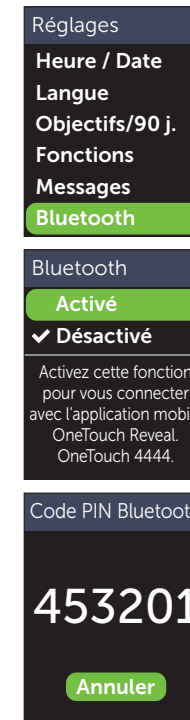

Exemple de code PIN

**ONETOUCH**  
**Verio Reflect**

Système de surveillance de la glycémie

## Guide de démarrage



AW 07218401A