


# Verkorte handleiding

## OneTouch Select Plus Flex™ bloedglucosesysteem

Gebruik deze verkorte handleiding om uw meter te leren kennen, en ga aan de hand van de hierin beschreven stappen aan de slag.

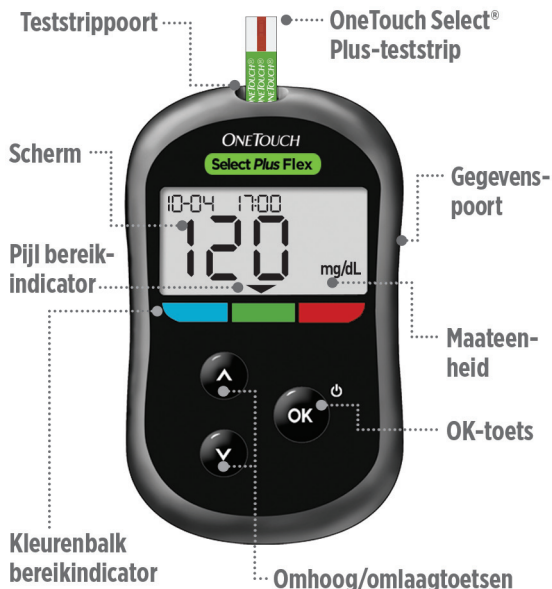

⚠ **BELANGRIJK:** Lees de handleiding die bij uw systeem is geleverd.



AW 06990301A

ONETOUCH®

## 1 Stel de tijd en datum in op uw meter

### Schakel de meter in


Houd **OK** ingedrukt tot het opstartscherm wordt weergegeven.

Gebruik de knoppen **↓** **↑** om elke instelling te bewerken en druk op **OK** om te bevestigen.




### Stel de tijd in op het eerste Instelscherm (SET)

- > **Het uur** knippert. Druk op **OK** als dit getal juist is of bewerk het en bevestig het.
- > **De minuten** knipperen. Druk op **OK** als dit getal juist is of bewerk het en bevestig het.

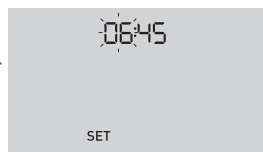

### Stel de datum in op het volgende Instelscherm (SET)

- > **Het jaar** knippert. Druk op **OK** als dit getal juist is of bewerk het en bevestig het.
- > **De maand** knippert. Druk op **OK** als dit getal juist is of bewerk het en bevestig het.
- > **De dag** knippert. Druk op **OK** als dit getal juist is of bewerk het en bevestig het.

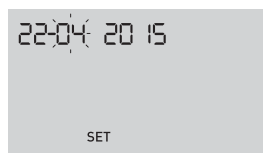

### Klaar om te testen

U bent klaar met het instellen van de meter wanneer het scherm met 3 streepjes wordt weergegeven.



## 2 Doe een test

### Contactstaafjes




### Teststrippoot




Er wordt een knipperende bloeddruppel weergegeven.

Schuif een teststrip in de teststrippoot met de contactstaafjes naar u toe gericht.

### Smal kanaaltje

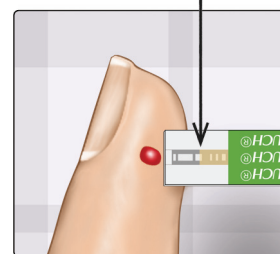

### Bevestigingsvenster vol

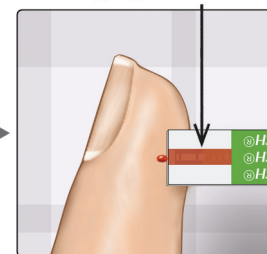

Houd de teststrip zodanig bij de bloeddruppel dat het smalle kanaaltje aan de rand van de teststrip de bloeddruppel enigszins raakt.

De bloeddruppel wordt in het smalle kanaaltje gezogen en het bevestigingsvenster moet zich volledig vullen.

3

### Bekijk het resultaat



Voorbeeld van een resultaat dat binnen bereik ligt

Het resultaat wordt op het scherm weergegeven. De pijl van de bereikindicator wijst naar de blauwe, groene of rode kleurenbalk van de bereikindicator en laat u zo weten of uw resultaat onder, binnen of boven uw bereik ligt.



Voorbeeld van een resultaat dat onder het bereik ligt



Voorbeeld van een resultaat dat boven het bereik ligt

4

### Optioneel: Maak verbinding met een mobiel apparaat


Uw meter wordt geleverd met **Bluetooth®** Smart-technologie. Hiermee kunt u uw resultaten draadloos naar een mobiel apparaat sturen, zoals een telefoon of tablet, waar u ze kunt bekijken en er grafieken mee kunt maken. Voor meer informatie over de draadloze functie van uw meter en om een volledige lijst met compatibele apparaten en softwaretoepassingen te zien, kunt u naar [www.LifeScan.be](http://www.LifeScan.be) gaan.

#### Verbinding maken met uw meter

Druk tegelijk op **OK** en **▲** om de **Bluetooth®** functie in en uit te schakelen. Wanneer uw mobiele apparaat dit aangeeft, voert u de pincode die op uw meter wordt weergegeven, in uw apparaat in.






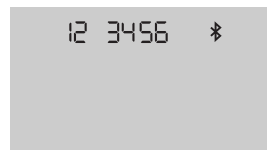



Het symbool  betekent dat **Bluetooth®** is ingeschakeld.



Voorbeeld van een pincode.
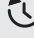
#### Metersymbolen

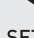
	Stroomvoorziening van de meter		<b>Bluetooth®</b> functie ingeschakeld
	Batterij bijna leeg		Geschiedenismodus (eerdere resultaten)
	Batterij leeg		Druppel aanbrengen
	Controlebloefstof		Pijl van bereikindicator
	Bezig met synchroniseren	<b>SET</b>	Instellingenmodus

### Over de bereikindicator

Uw meter wordt geleverd met een bereikindicator die u automatisch laat weten of uw resultaat onder, boven of binnen uw bereik ligt. De boven- en ondergrenzen van het bereik die de bereikindicator gebruikt, zijn als volgt vooraf ingesteld:



Vooraf ingestelde ondergrens van het bereik

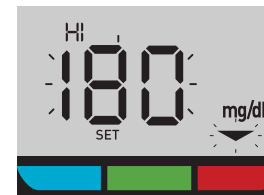

Vooraf ingestelde bovengrens van het bereik

Raadpleeg uw handleiding voor meer informatie over het naar uw behoeften wijzigen van de vooraf ingestelde bereiksgrenzen.

Het **Bluetooth®** woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik door LifeScan Scotland Ltd. van dergelijke merken valt onder de licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

CE  
0344

IVD

Revisiedatum: 03/2015  
© 2015 LifeScan, Inc.  
AW 06990301A

LifeScan Europe  
Division of Cilag  
GmbH International  
Gubelstrasse 34  
6300 Zug  
Switzerland

Gedistribueerd door:  
LifeScan  
Division of Johnson &  
Johnson Medical NV  
Leonardo Da Vinciiaan, 15  
B-1831 Diegem  
België

Contacteer onze gratis  
OneTouch®-lijn via  
0800-15325 (België) of  
bezoek onze website  
[www.LifeScan.be](http://www.LifeScan.be).



**ONETOUCH®**