


Guide de prise en main

Système de surveillance de la glycémie OneTouch Select Plus Flex™

Ce guide est destiné à vous familiariser avec votre lecteur. Suivez les étapes décrites pour commencer :

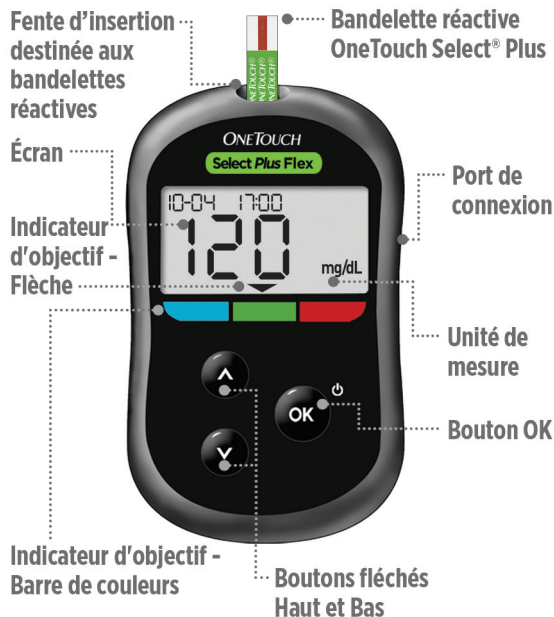

⚠ **IMPORTANT : Veuillez lire le manuel d'utilisation fourni avec le système.**



AW 06990501A

ONE TOUCH®

1 Régler l'heure et la date sur le lecteur

Mettez-le en marche

Appuyez sur **OK** et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'écran de démarrage apparaisse.

Utilisez les boutons **↓** **↑** pour modifier chaque réglage et appuyez sur **OK** pour confirmer.




Réglez l'heure sur le premier écran SET (RÉGLER)

- > **L'heure** clignote. Appuyez sur **OK** si celle-ci est correcte, sinon modifiez puis confirmez.
- > **Les minutes** clignent. Appuyez sur **OK** si c'est correct, ou modifiez puis confirmez.



Réglez la date sur l'écran SET (RÉGLER) suivant

- > **L'année** clignote. Appuyez sur **OK** si celle-ci est correcte, sinon modifiez puis confirmez.
- > **Le mois** clignote. Appuyez sur **OK** si celui-ci est correct, sinon modifiez puis confirmez.
- > **Le jour** clignote. Appuyez sur **OK** si celui-ci est correct, sinon modifiez puis confirmez.

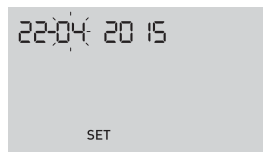

Prêt à tester

La configuration du lecteur est terminée lorsque l'écran contenant trois tirets s'affiche.



2 Réaliser un test

Barres de contact




Une goutte de sang clignotante s'affiche.


Fente d'insertion destinée aux bandelettes réactives

Insérez une bandelette réactive dans la fente d'insertion des bandelettes réactives, barres de contact orientées vers vous.

Sillon étroit

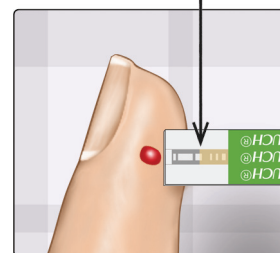

Fenêtre de confirmation remplie

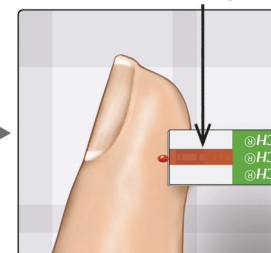

Alignez la bandelette réactive avec la goutte de sang, de sorte que le sillon étroit situé à l'extrémité de la bandelette réactive soit tout juste en contact avec la goutte de sang.

La goutte de sang est aspirée dans le sillon étroit et la fenêtre de confirmation doit être complètement remplie.

3

Afficher votre résultat



Exemple d'un résultat dans l'objectif

Votre résultat s'affiche à l'écran. La flèche de l'indicateur d'objectif pointe vers la barre de couleur bleue, verte ou rouge de l'indicateur d'objectif, pour vous indiquer si votre résultat est, respectivement, inférieur aux limites de votre objectif, dans votre objectif ou supérieur aux limites de votre objectif.



Exemple de résultat inférieur aux limites de l'objectif



Exemple de résultat supérieur aux limites de l'objectif

4


Facultatif : Connecter le lecteur à un appareil mobile

Votre lecteur est équipé de la technologie **Bluetooth®** Smart. Ceci vous permet d'envoyer vos résultats par l'intermédiaire d'une connexion sans fil vers un appareil mobile tel qu'un téléphone ou une tablette, sur lesquels vous pouvez afficher vos résultats et les transformer en graphiques.


Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions sans fil de votre lecteur et pour afficher une liste complète des appareils et applications logicielles compatibles, consultez notre site Web à l'adresse www.LifeScan.be ou www.LifeScan.lu.

Connexion de votre lecteur

Appuyez simultanément sur **OK** et **^** pour activer ou désactiver la fonction **Bluetooth®**. Lorsque votre appareil mobile vous y invite, saisissez sur ce dernier le code PIN affiché par votre lecteur.

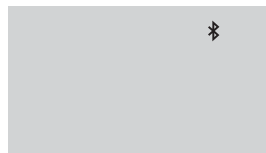



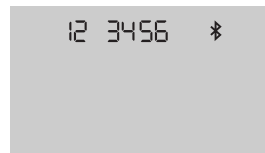






Le symbole  indique que la fonction **Bluetooth®** est activée.

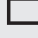

Exemple d'un code PIN.

Symboles du lecteur

	Alimentation du lecteur		Fonction Bluetooth® activée
	Pile faible		Mode Historique (mesures antérieures)
	Pile vide		Appliquer l'échantillon
	Solution de contrôle		Flèche d'indicateur d'objectif
	Synchronisation en cours	SET	Mode de configuration

À propos de l'indicateur d'objectif

Votre lecteur est doté d'un indicateur d'objectif qui vous indique automatiquement si votre résultat est inférieur aux limites de votre objectif, dans ces limites ou supérieur à ces limites. Les limites inférieures et supérieures d'objectif utilisées par l'indicateur d'objectif sont préconfigurées comme suit :



Limite inférieure d'objectif



Limite supérieure d'objectif

Pour plus de détails sur la personnalisation des limites d'objectif préconfigurées, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

La marque verbale et les logos **Bluetooth®** sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par LifeScan Scotland Ltd. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CE
0344

IVD

Date rév. : 03/2015
© 2015 LifeScan, Inc.
AW 06990501A


LifeScan Europe
Division of Cilag
GmbH International
Gubelstrasse 34
6300 Zug
Switzerland

Distribué par :
LifeScan
Division of Johnson &
Johnson Medical NV/SA
Leonardo Da Vinciiaan, 15
B-1831 Diegem
Belgique

Contactez la ligne
gratuite OneTouch®
au 0800-14660 (BE)
ou 800-25749 (LU),
ou bien visitez notre site
Web www.LifeScan.be
ou www.LifeScan.lu.



ONETOUCH®