


Gebruiksaanwijzing


AFBEELDING 1:

Reinig de wonde met bijv. een fysiologische oplossing.

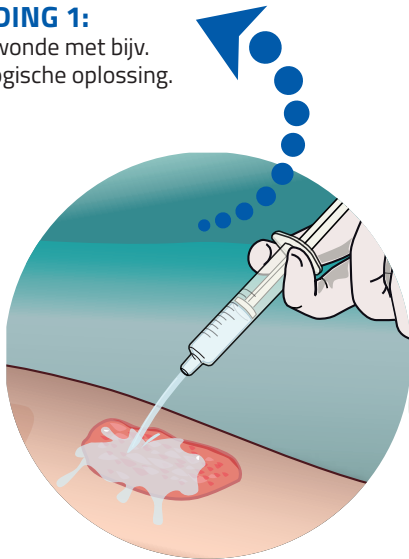


AFBEELDING 2:

Breng een laag aan van 2 mm Hyalo⁴ Control crème eenmaal of tweemaal daags, afhankelijk van de ernst van de wond.

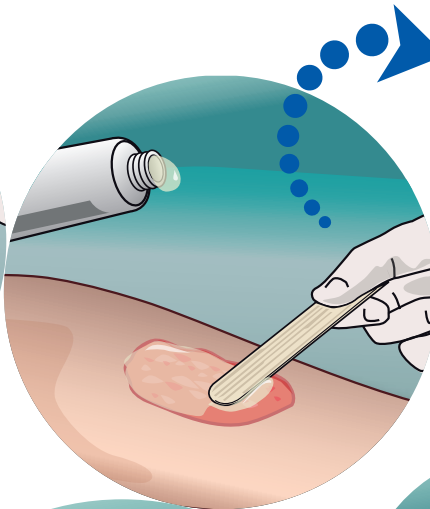


AFBEELDING 3:

Dek af met steriel niet-adherent verbandmateriaal.

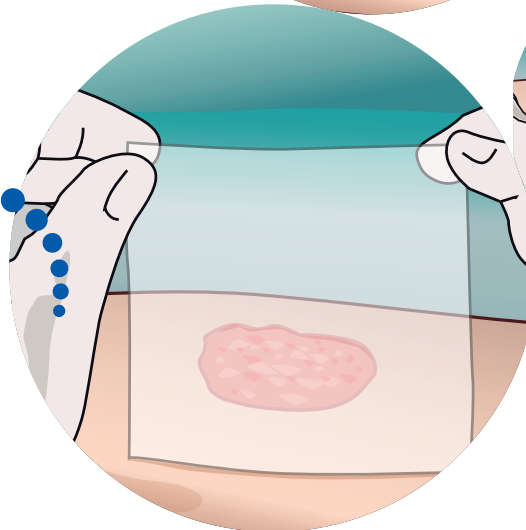

AFBEELDING 4:

Breng een zwachtel aan zodat er voldoende contact is.

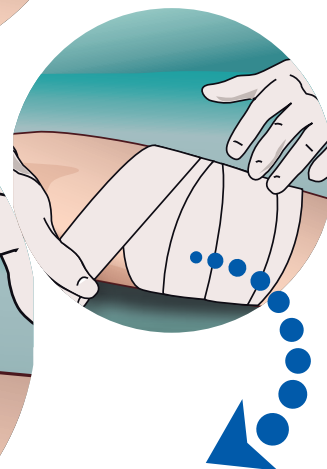

Niet combineren met quaternaire ammoniumzouten (Cedium benzalkonium, Aseptiderm, Cetavlex, H.A.C., Hacidil-S en Sterillium) of met lokaal aangebrachte proteolytische enzymen, omdat deze met het product kunnen interageren.

Deze producten zijn medische hulpmiddelen (CE 0459)
Datum laatste herziening teksten: 12/2020