
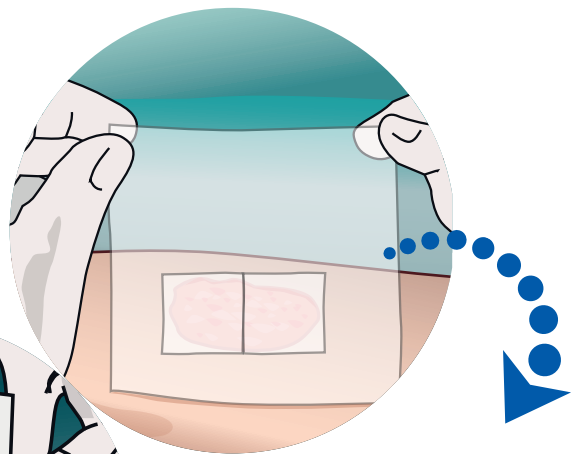


### Gebruiksaanwijzing

Wanneer Hyalo<sup>4</sup> Regen verbandgaas in contact komt met het exsudaat, verandert het in een gelachtige substantie die geleidelijk wordt geabsorbeerd en oplost. De wonde moet om de 2 tot 3 dagen worden gecontroleerd. Er wordt aanbevolen om Hyalo<sup>4</sup> Regen verbandgaas elke 3 tot 4 dagen aan te brengen, of eerder, afhankelijk van het wondexsudaat. Laat nog niet geabsorbeerd product bij de nieuwe aanbrenging op zijn plaats zitten.

#### AFBEELDING 1:

Verwijder purulent materiaal en/of necrotisch debris (debridement) en reinig de wonde met een fysiologische oplossing.

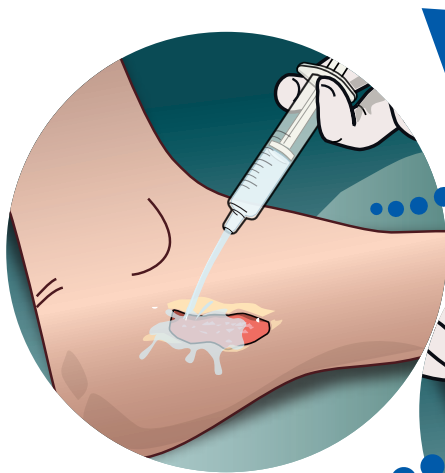

#### AFBEELDING 2:

Breng Hyalo<sup>4</sup> Regen verbandgaas aan met het gladde oppervlak in contact met de wonde. Zorg dat de wonde volledig bedekt wordt. Het is mogelijk om het verbandgaas te snijden tot de juiste omvang van de wonde gebruikmakend van een steriele schaar of scalpel. Gebruik de resterende delen niet voor latere applicaties.

Hyalo<sup>4</sup> Regen verbandgaas werkt alleen als het een gel vormt in de wonde. Bevochtig daarom bij een droge wonde het aangebrachte Hyalo<sup>4</sup> Regen verbandgaas met een paar druppels fysiologische oplossing.

#### AFBEELDING 3:

Voor uitgebreide wonden kan je één of meerdere verbandgazen gebruiken, opeenvolgend of indien nodig overlappend, met het doel het gehele letsel te bedekken. Bedek verder met een steriel gaas of een niet-adherent verband met een aangepaste absorberende capaciteit (dagelijkse controle van secundair verband).

Niet combineren met quaternaire ammoniumzouten (Cedium benzalkonium, Aseptiderm, Cetavlex, H.A.C., Hacdil-S en Sterillium).

Deze producten zijn medische hulpmiddelen (CE 0373)  
Lees aandachtig de waarschuwingen en de gebruiksaanwijzing  
Datum laatste herziening teksten: 12/2020