

HYALO⁴

Regen

COMBLEZ LA CAVITÉ AVEC LA
MATRICE NATURELLE ADÉQUATE !



Ces produits sont des dispositifs médicaux (CE 0373)
Lisez attentivement les précautions et les instructions d'utilisation

ACIDE HYALURONIQUE

Environnement humide
dans la plaie
Soutien de la cicatrisation

COLLAGÈNE DE CHEVAL

Support structurel pour les cellules
Chimiotactique pour les fibroblastes
Substrat sacrificiel pour les
métalloprotéases matricielles
Absorption de l'exsudat de
la plaie → formation d'un gel

Caractéristiques

Taille de l'emballage	Code CNK	Prix public
5x5 cm, 5 unités	3412-426	€ 47,30
10x10 cm, 5 unités	3412-434	€ 116,20

Présentation

- 5x5 cm, 5 pansements bioactifs
- 10x10 cm, 5 pansements bioactifs

Composition

- Sel sodique d'acide hyaluronique à 2,5 %
- Collagène de cheval type 1 à 97,5 %

Indications

- Plaies aiguës et chroniques non infectées avec perte de tissu
- Agent hémostatique local

Instructions d'utilisation

En contact avec les exsudats, Hyalo4® Regen pansement se gélifie. Ce gel est absorbé et se dissout avec le temps. La plaie doit être vérifiée tous les 2-3 jours. Il est recommandé d'utiliser les pansements Hyalo4® Regen tous les 3 ou 4 jours ou à des intervalles plus rapprochés, en fonction de l'exsudat. Le produit qui n'est pas encore résorbé lors de la nouvelle application ne doit pas être retiré.

PHOTO 1 :

Enlevez la matière purulente et/ou les débris nécrotiques (débridement) et nettoyez la lésion avec de la solution physiologique.

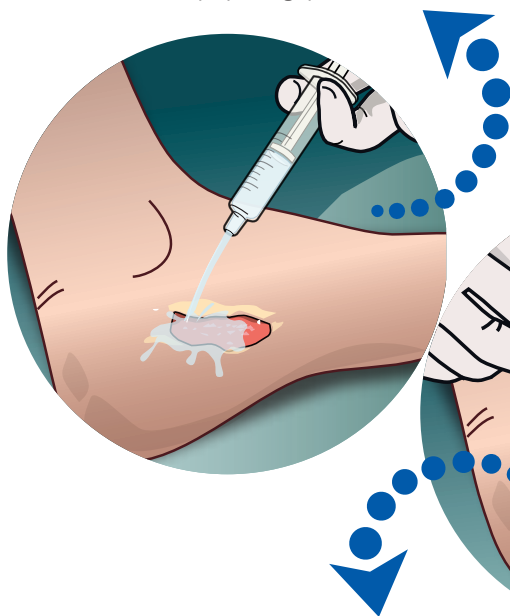


PHOTO 2 :

Appliquez le pansement Hyalo4® Regen, la surface lisse en contact avec la plaie. Assurez-vous que le lit de la plaie est totalement couvert. Vous pouvez découper le pansement à la bonne taille de la plaie en utilisant des ciseaux ou un scalpel stériles. Ne réutilisez pas les restes du pansement.

Le pansement Hyalo4® Regen n'est actif que s'il se gélifie sur le site de la plaie. Par conséquent, si la plaie est sèche, appliquez le pansement Hyalo4® Regen et humidifiez-le avec quelques gouttes de solution physiologique.

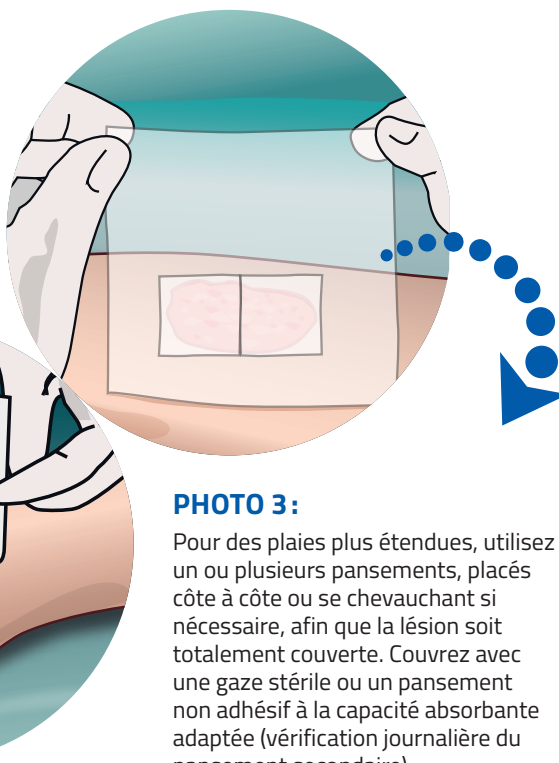


PHOTO 3 :

Pour des plaies plus étendues, utilisez un ou plusieurs pansements, placés côte à côte ou se chevauchant si nécessaire, afin que la lésion soit totalement couverte. Couvrez avec une gaze stérile ou un pansement non adhésif à la capacité absorbante adaptée (vérification journalière du pansement secondaire).

- Ne pas utiliser le produit en même temps que des sels d'ammonium quaternaires (Cedum benzalkonium, Aseptiderm, Cetavlex, H.A.C., Hacdil-S et Sterillium).

Chen, W.Y.J., & Abatangelo, G. (1999). Functions of hyaluronan in wound repair. *Wound Rep Reg*, 7, 79-89.
 Prosdociimi, M., & Bevilacqua, C. (2012). Exogenous hyaluronic acid and wound healing: an updated vision. *Panminerva Medica*, 54 (2), 129-135.
 Fleck, C.A., & Simman, R. (2010). Modern collagen wound dressings: function and purpose. *J Am Coll Clin Wound Spec*, 2, 50-54.
 Turner, N.J., & Badylak, F. (2015). The use of biologic scaffolds in the treatment of chronic nonhealing wounds. *Adv Wound Care*, 4, 490-500.
 Instructions d'utilisation Hyalo4® Regen.

Date de la dernière mise à jour : 08/2020