

HYALO⁴

Regen

VUL HET WEEFSELDEFECT OP MET
DE JUISTE NATUURLIJKE MATRIX!



HYALURONZUUR

Vochtige wondomgeving
Ondersteuning wondheling

PAARDENCOLLAGEEN

Structurele ondersteuning cellen
Chemotactisch voor fibroblasten
Opofferingssubstraat voor
matrixmetalloproteasen

Absorptie wondexsudaat → vorming van gel

Deze producten zijn medische hulpmiddelen (CE 0373)
Lees aandachtig de waarschuwingen en gebruiksaanwijzing

Kenmerken

Verpakkings- grootte	CNK Code	Publieks- prijs
5x5 cm, 5 stuks	3412-426	€ 47,30
10x10 cm, 5 stuks	3412-434	€ 116,20

Presentatie

- 5x5 cm, 5 bioactieve verbandgazen
- 10x10 cm, 5 bioactieve verbandgazen

Samenstelling

- 2,5% Hyaluronzuur natriumzout
- 97,5% Paardencollageen type 1

Indicaties


- Acute en chronische niet-geïnfecteerde wonden met verlies van substantie
- Lokaal hemostaticum

Gebruiksaanwijzing

Wanneer Hyalo4[®] Regen verbandgaas in contact komt met het exsudaat, verandert het in een gelachtige substantie die geleidelijk wordt geabsorbeerd en oplost. De wonde moet om de 2 tot 3 dagen worden gecontroleerd. Er wordt aanbevolen om Hyalo4[®] Regen verbandgaas elke 3 tot 4 dagen aan te brengen, of eerder, afhankelijk van het wondexsudaat. Laat nog niet geabsorbeerd product bij de nieuwe aanbrenging op zijn plaats zitten.

AFBEELDING 1:

Verwijder purulent materiaal en/of necrotisch debris (debridement) en reinig de wonde met een fysiologische oplossing.

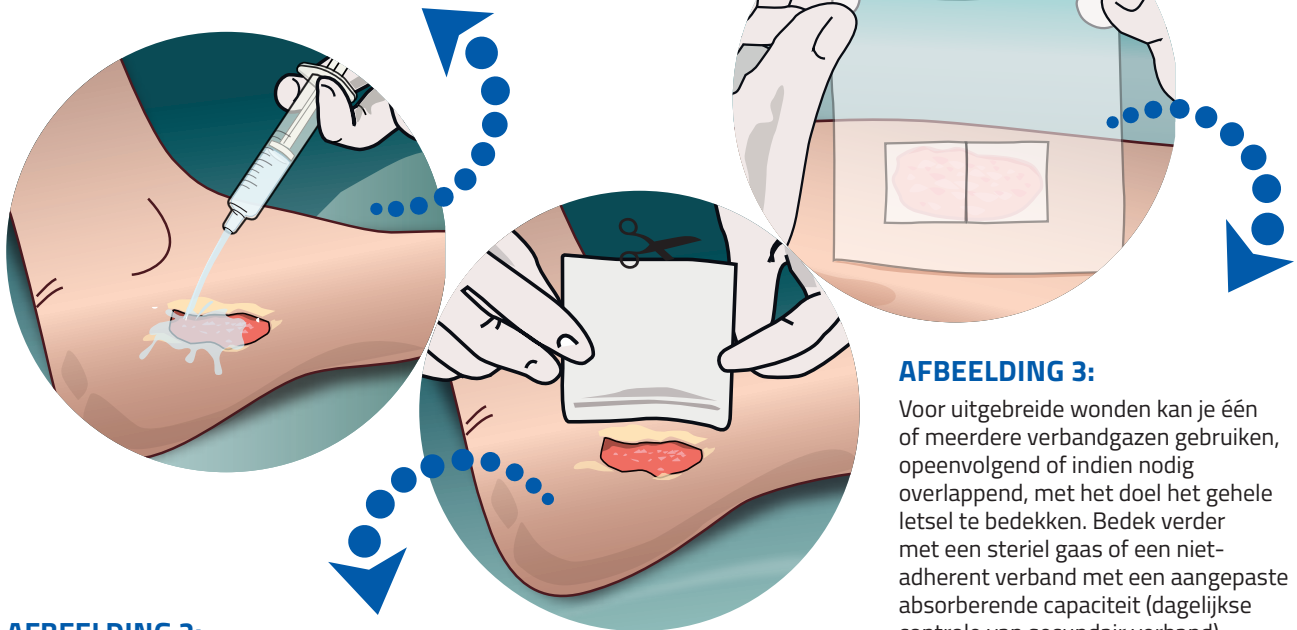

AFBEELDING 2:

Breng Hyalo4[®] Regen verbandgaas aan met het gladde oppervlak in contact met de wonde. Zorg dat de wonde volledig bedekt wordt. Het is mogelijk om het verbandgaas te snijden tot de juiste omvang van de wonde gebruikmakend van een steriele schaar of scalpel. Gebruik de resterende delen niet voor latere applicaties.

Hyalo4[®] Regen verbandgaas werkt alleen als het een gel vormt in de wonde. Bevochtig daarom bij een droge wonde het aangebrachte Hyalo4[®] Regen verbandgaas met een paar druppels fysiologische oplossing.

AFBEELDING 3:

Voor uitgebreide wonden kan je één of meerdere verbandgazen gebruiken, opeenvolgend of indien nodig overlappend, met het doel het gehele letsel te bedekken. Bedek verder met een steriel gaas of een niet-adherent verband met een aangepaste absorberende capaciteit (dagelijkse controle van secundair verband).

- Niet combineren met quaternaire ammoniumzouten (Cedium benzalkonium, Aseptiderm, Cetavlex, H.A.C., Hacdil-S en Sterillium).

Chen, W.Y.J., & Abatangelo, G. (1999). Functions of hyaluronan in wound repair. *Wound Rep Reg*, 7, 79-89.
Prosdoci, M., & Bevilacqua, C. (2012). Exogenous hyaluronic acid and wound healing: an updated vision. *Panminerva Medica*, 54 (2), 129-135.
Fleck, C.A., & Simman, R. (2010). Modern collagen wound dressings: function and purpose. *J Am Coll Clin Wound Spec*, 2, 50-54.
Turner, N.J., & Badyrak, F. (2015). The use of biologic scaffolds in the treatment of chronic nonhealing wounds. *Adv Wound Care*, 4, 490-500.
Instructies voor gebruik Hyalo4[®] Regen.

Datum laatste herziening teksten: 08/2020