

Instructions d'utilisation

En contact avec les exsudats, Hyalo⁴® Regen pansement se gélifie. Ce gel est absorbé et se dissout avec le temps. La plaie doit être vérifiée tous les 2-3 jours. Il est recommandé d'utiliser les pansements Hyalo⁴® Regen tous les 3 ou 4 jours ou à des intervalles plus rapprochés, en fonction de l'exsudat. Le produit qui n'est pas encore résorbé lors de la nouvelle application ne doit pas être retiré.

PHOTO 1:

Enlevez la matière purulente et/ou les débris nécrotiques (débridement) et nettoyez la lésion avec de la solution physiologique.

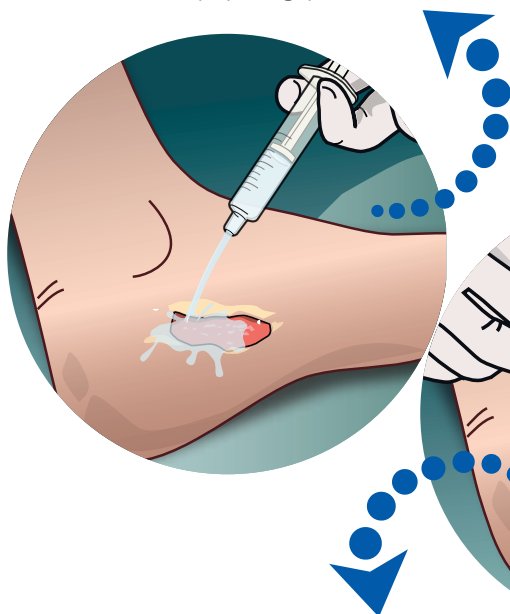


PHOTO 2:

Appliquez le pansement Hyalo⁴® Regen, la surface lisse en contact avec la plaie. Assurez-vous que le lit de la plaie est totalement couvert. Vous pouvez découper le pansement à la bonne taille de la plaie en utilisant des ciseaux ou un scalpel stériles. Ne réutilisez pas les restes du pansement.

Le pansement Hyalo⁴® Regen n'est actif que s'il se gélifie sur le site de la plaie. Par conséquent, si la plaie est sèche, appliquez le pansement Hyalo⁴® Regen et humidifiez-le avec quelques gouttes de solution physiologique.

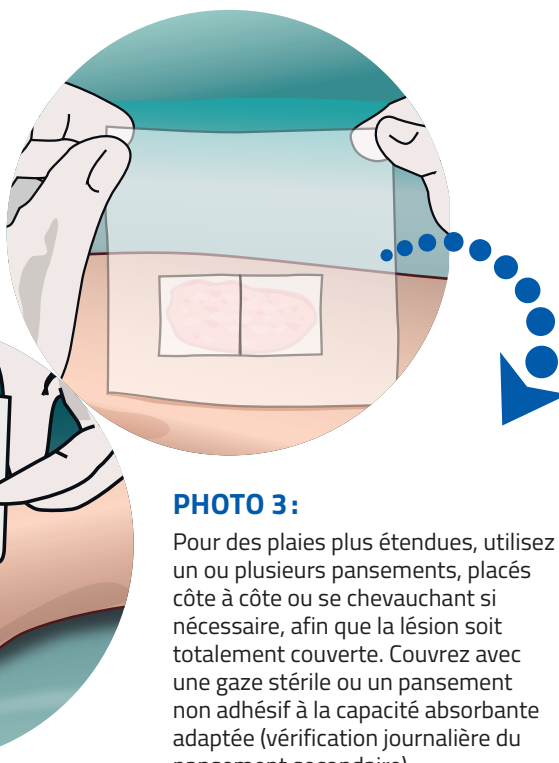


PHOTO 3:

Pour des plaies plus étendues, utilisez un ou plusieurs pansements, placés côte à côte ou se chevauchant si nécessaire, afin que la lésion soit totalement couverte. Couvrez avec une gaze stérile ou un pansement non adhésif à la capacité absorbante adaptée (vérification journalière du pansement secondaire).

Ne pas utiliser le produit en même temps que des sels d'ammonium quaternaires (Cedum benzalkonium, Aseptiderm, Cetavlex, H.A.C., Haccil-S et Sterillium).