



## Instructions d'utilisation Hyalo4<sup>®</sup> Skin crème et gel

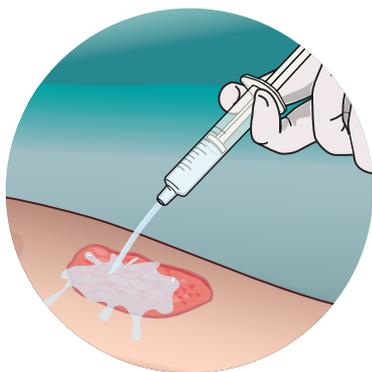


### ÉTAPE 1

Nettoyez la plaie avec, par exemple, une solution physiologique.

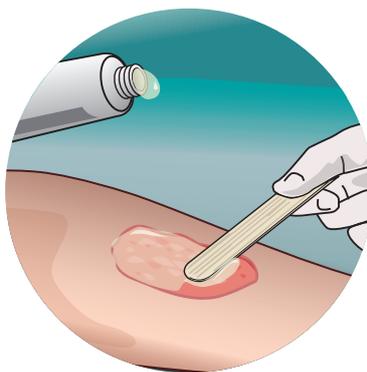

### ÉTAPE 2


Appliquez Hyalo4<sup>®</sup> Skin crème ou gel, deux ou trois fois par jour en vous assurant de couvrir la totalité de la plaie.

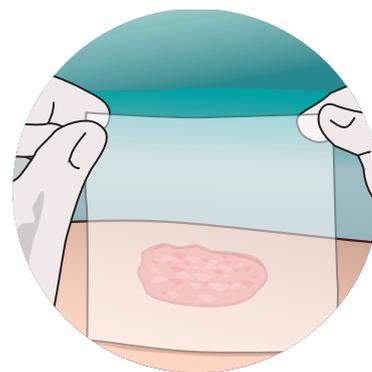

### ÉTAPE 3

Couvrez avec un pansement stérile non adhésif.

## Instructions d'utilisation Hyalo4<sup>®</sup> Skin compresses de gaze

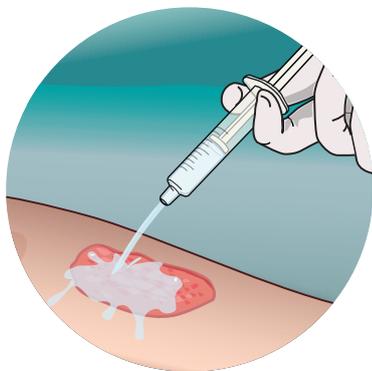

### ÉTAPE 1

Nettoyez la plaie avec, par exemple, une solution physiologique.



### ÉTAPE 2

Appliquez une ou plusieurs Hyalo4<sup>®</sup> Skin compresses de gaze, deux ou trois fois par jour, selon l'étendue de la lésion.



### ÉTAPE 3

Couvrez la gaze avec un bandage stérile.

Ne pas utiliser le produit en même temps que des sels d'ammonium quaternaires (Cedium benzalkonium, Aseptiderm, Cetavlex, H.A.C., Hacdil-S et Sterillium).