

## Protifix crème adhésive Aloe Vera 40ml

ref. 6673

cnk 2563-948

### Déscription produit

Protifix Crème adhésive pour les prothèses dentaires avec une adhérence extra forte et de longue durée.

Contient de l'Aloe vera et ses propriétés naturelles, soignantes et adoucissantes pour les muqueuses sensibles.

### Caractéristiques

Soins

### Ingrédients

Mélange de sels sodiques et calciques d'un copolymère composé d'ether méthylo-vinyle et d'anhydride d'acide maléique, cellulose carboxyméthyle, paraffine, vaseline, Aloe vera Barbados Miller, dioxyde de silicium, menthol, azurobine, méthyl-4-hydroxybenzoate  
Contenu: 47g=40ml

### Posologie

Nettoyer la prothèse et déposer la crème adhésive Protifix® en plusieurs points espacés sur la prothèse mouillée. Presser le tube dans le tiers inférieur près de son ouverture. Mettre la prothèse dans la bouche et presser fortement pendant quelques secondes. Refermer soigneusement le tube après application en veillant à maintenir l'ouverture propre et sèche.

### Indications

Contrairement à de nombreux produits, la crème adhésive Protifix® s'applique directement sur la prothèse dentaire humide: son puissant pouvoir adhésif en milieu "mouillé" est immédiatement actif une adhésion efficace des bords empêche que les résidus alimentaires pénètrent son action longue durée vous procure une sensation de sécurité et d'indépendance lorsque vous mangez, parlez ou chantez

### Précautions

N'appliquer que sur une muqueuse saine

### Analyse

/100 g

%AR

### Prix

Prix public conseillé: 6,10 Euro

Uniquement disponible en pharmacies.

**Date de dernière mise à jour 08/07/2019**

*Cette information est saisie à partir des informations fournies par notre fournisseur, sans aucun engagement et sous toutes réserves.*

# Protifix®

