

# Earclin earshower enfant élimine cérumen

ref. 7610

cnk 3767-696

## Déscription produit

Elimine le cérumen, modèle pour enfants

Earclin earshower est un dispositif médical classe I

## Caractéristiques

Soins

## Ingrédients

ASODIUM TALLOWATE, GLYCERIN, AQUA (WATER), SORBITOL, SUCROSE, PEG-400, TETRASODIUM

## Posologie

1 Remplissez: Presser la poire d'aspiration pour aspirer l'eau tiède (max 40 °C). L'eau se mélangera avec le savon contenu dans la partie inférieure de votre douche pour oreilles earClin.

2 Rincez: Inclinez la tête, placez la buse de la douche pour oreilles à l'entrée du canal auditif et appuyez. Laissez la solution savonneuse ramollir le cérumen et inclinez votre tête en arrière pour vider votre oreille.

3 Séchez: Utilisez la douche pour oreilles vide pour insuffler doucement de l'air dans le canal auditif jusqu'à ce qu'il soit sec.

Nous recommandons d'utiliser la douche pour oreilles earClin tous les deux jours. Répétez la procédure trois fois à chaque occasion. Le savon bleu durera environ 30 jours. Remplacez votre douche pour oreilles earClin une fois que le savon est épuisé. Ne l'utilisez pas plus de 30 jours consécutifs.

## Indications

Enlève l'excès de cérumen avec de l'eau et du savon

## Précautions

Les petites pièces présentent un risque d'étouffement – tenir hors de la portée des enfants. N'utilisez pas la douche pour oreilles si vous souffrez d'une inflammation du canal auditif ou d'un tympan perforé.

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans. Rincer plusieurs fois à l'eau avant de l'utiliser pour la première fois. N'utilisez que de l'eau propre et tiède (max 40 °C).

N'utilisez la douche pour oreilles earClin que pour nettoyer le canal auditif humain.

## Avantages

Rapide, facile et sûr

Nettoie le canal auditif

Garde l'oreille propre et claire

Empêche l'impaction de cérumen

Lave le surplus de cérumen




## Earclin earshower enfant élimine cérumen

### Analyse

/100 g

%AR

### Prix

Prix public conseillé: 10,95 Euro

Uniquement disponible en pharmacies.

**Date de dernière mise à jour** 4/9/2018

*Cette information est saisie à partir des informations fournies par notre fournisseur, sans aucun engagement et sous toutes réserves.*