

Protifix crème adhésive X-fort avec propolis 40ml

ref. 7659

cnk 3924-958

Déscription produit

Protifix Crème adhésive avec l'élément naturel de propolis, pour les prothèses dentaires avec une adhérence extra forte et de longue durée.

Caractéristiques

Soins

Ingrédients

Mélange de sels sodiques et calciques d'un copolymère composé d'éther méthyl-vinyle et d'anhydride d'acide maléique, cellulose carboxyméthylée, paraffine, vaseline, dioxyde de silicium, extrait de Propolis, menthol, azurobine, méthyl-4-hydroxybenzoate.

Ne contient pas de zinc.

Contenu: 47g=40ml

Posologie

Nettoyer la prothèse et déposer la crème adhésive Protifix® Extra-Forte avec Propolis en plusieurs points espacés sur la prothèse mouillée. Presser le tube dans le tiers inférieur près de son ouverture. Mettre la prothèse dans la bouche et presser fortement pendant quelques secondes. Refermer soigneusement le tube après application en veillant à maintenir l'ouverture propre et sèche.

Indications

Contrairement à de nombreux produits, la crème adhésive Protifix® s'applique directement sur la prothèse dentaire humide:

- son puissant pouvoir adhésif en milieu "mouillé" est immédiatement actif
- une adhésion efficace des bords empêche que les résidus alimentaires pénètrent
- son action longue durée vous procure une sensation de sécurité et d'indépendance lorsque vous mangez, parlez ou chantez

Précautions

N'appliquer que sur une muqueuse saine

Analyse

| | /100 g | %AR |
|--|--------|-----|
| | | |

Prix

Prix public conseillé: 6,35 Euro

Uniquement disponible en pharmacies.

Date de dernière mise à jour 29/07/2019

Cette information est saisie à partir des informations fournies par notre fournisseur, sans aucun engagement et sous toutes réserves.

Protifix®

