

Earclin earshower volw. oorsmeerverwijderaar

ref. 7609

cnk 3544-970

Productbeschrijving

Oorsmeerverwijderaar
 Earclin earshower is een medisch hulpmiddel klasse 1

Kenmerken

Verzorging

Ingrediënten

ASODIUM TALLOWATE, GLYCERIN, AQUA (WATER), SORBITOL,
 SUCROSE, PEG-400, TETRASODIUM

Posologie

1 Vullen: Knijp op de zuiger bovenaan het apparaatje om lauw water (max. 40°C) op te zuigen. Het water zal zich mengen met de zeep, die zich in het onderste deel van uw earClin earshower bevindt.

2 Spoelen: Kantel uw hoofd, plaats de tuit van de earshower aan de ingang van de gehoorgang en knijp. Laat de zeepoplossing het oorsmeer verzachten en kantel uw hoofd terug om uw oor te laten leeglopen.

3 Drogen: Gebruik de lege earshower om zachtjes lucht in de gehoorgang te blazen tot die droog is.

Wij raden u aan om earClin earshower om de twee dagen te gebruiken. Herhaal de procedure drie keer. De blauwe zeep blijft ongeveer 30 dagen goed. Vervang uw earClin earshower zodra de zeep op is. Niet gebruiken gedurende meer dan 30 opeenvolgende dagen.

Indicaties

Verwijdert overmatig oorsmeer met water en zeep.

Voorzorgsmaatregelen

Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Buiten bereik van kinderen houden. EarClin earshower niet gebruiken wanneer u een ontstoken gehoorgang of geperforeerd trommelvlies heeft.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar. Enkele keren met water spoelen voor het eerste gebruik.

Gebruik enkel zuiver en lauw water (max. 40°C). Gebruik earClin earshower enkel om de gehoorgang zuiver te maken.

Voordelen

Snel, makkelijk & veilig
 Reinigt het oorkanaal
 Houdt het oor zuiver & open
 Voorkomt oorproppen
 Wast het overmatige oorsmeer weg




Earclin earshower volw. oorsmeerverwijderaar

Analyse

/100 g

%RI

Prijs

Aanbevolen publieksprijs: 10,95 Euro

Enkel verkrijgbaar in de apotheek

Datum laatste wijziging

4/9/2018

Deze informatie is ingevuld op basis van inlichtingen ons verstrekt door de leverancier en dit zonder enige verbintenis en onder alle voorbehoud.